



TRACK 

wheelz ahead[®]
LET'S GET MOVING



Gefeliciteerd met de aankoop van deze WheelzAhead® rollator!

Voordat u gebruik gaat maken van uw rollator, vragen wij u en uw eventuele begeleider eerst bijgaande handleiding aandachtig door te lezen.

Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn omtrent uw rollator of hetgeen weergegeven in deze handleiding, neemt u dan contact op met WheelzAhead®.

Het productiesysteem van uw rollator is door TÜV gecertificeerd en voldoet aan de richtlijnen van ISO 13485.

WheelzAhead® verklaart dat uw rollator voldoet aan Europese richtlijnen voor medische hulpmiddelen 93/42/EEG en 2007/47/EEG.

Inhoudsopgave

1	Algemene toelichting op uw rollator	4
2	Technische specificaties	7
3	Veilig gebruik maken van uw rollator	8
4	Uitleg over het gebruik van uw rollator	11
5	Garantie	16

1 Algemene toelichting op uw rollator

Wat heb ik gekocht?

U heeft een opvouwbare, lichtgewicht rollator gekocht. Deze rollator is bedoeld voor gebruik binnens- en buitenshuis en voor gebruikers die verminderd mobiel zijn.

Waar kan ik het serienummer van de rollator vinden?

Op de kruisstang onder de zitting vindt u een sticker met daarop het serienummer van uw rollator.

Wat is het maximaal toelaatbare gewicht?

Het maximaal toelaatbare gewicht is 135 Kg. Dit is inclusief eventuele bagage in de opbergtassen en andere artikelen die met de rollator vervoerd worden.

Hoe is de rollator opgebouwd?



- | | | | |
|---|----------------------|----|---------------|
| 1 | Handvatten | 10 | Frameslot |
| 2 | Handrem / Parkeerrem | 11 | Zwenkwielslot |
| 3 | Rugband | 12 | Reflectoren |
| 4 | Wandelstokhouder | 13 | Voorwiel |
| 5 | Lampje | 14 | Achterwiel |
| 6 | Zitting | 15 | Tilpedaal |
| 7 | Tashouder | 16 | Wielrem |
| 8 | Kruisframe | | |
| 9 | Hoogteverstelling | | |

2 Technische specificaties

TRACK

Lengte	675 mm
Totale breedte	640 mm
Breedte tussen de handgrepen	500 mm
Hoogte	805 - 935 mm
Afmeting opgevouwen	675 x 185 x 805 mm
Hoogte zitting	560 mm
Breedte zitting	460 mm
Diepte zitting	225 mm
Compleet gewicht	6,1 Kg

3 Veilig gebruik maken van uw rollator

Moet ik nog iets controleren voor het rijden?

Zorg er vóór gebruik altijd voor dat de volgende vragen bevestigend kunnen worden beantwoord:

- Werken de remmen goed?
- Is het frameslot goed bevestigd?
- Is de zitting volledig uitgeklapt?

Wanneer kan ik deelnemen aan het verkeer?

Het is belangrijk dat u goed oefent in het gebruik van uw rollator voordat u hiermee aan het verkeer deelneemt.

Hebben aanpassingen aan de rollator invloed op de veiligheid?

Aanpassingen kunnen het veilig gebruiken van de rollator negatief beïnvloeden. WheelzAhead® kan de kwaliteit van de rollator niet langer garanderen als er aanpassingen zijn uitgevoerd. Ook de garantie vervalt bij het aanbrengen van aanpassingen.

Wanneer kan mijn rollator kantelen?

Dit is mogelijk in de volgende situaties:

- U bevindt zich op een hellend vlak
- Bij het op- en afrijden van stoepen
- Op ongelijke grond, putten en kuilen bijvoorbeeld
- Bij het rijden naar dingen die zich te ver voor, achter of naast de rollator bevinden

Oefen onder begeleiding zowel het rijden op een hellend vlak als het op- en afrijden van stoepen. Door uw bovenlichaam voor- of achterwaarts te bewegen, verplaatst u het zwaartepunt van de rollator. Zo kunt u obstakels veiliger nemen. Indien u twijfelt, probeert u het obstakel dan nooit zonder begeleiding te nemen.

Wanneer zet ik de parkeerrem vast?

In de volgende gevallen dient u altijd beide remmen vast te zetten:

- Als u op de rollator gaat zitten
- Bij het opstaan uit de rollator
- In een lift of op een rolstoellift
- Als u stopt op een oneffen oppervlak

Hoe stel ik de remmen af?

Dit werkt eigenlijk hetzelfde als bij een fiets. Aan de onderzijde van het frame, nabij het achterwiel, zit het uiteinde van de remkabel. Door aan de schroef om het uiteinde te draaien, kunt u de remkabel strakker of losser spannen. Indien u twijfelt over de spanning van de remkabel of de remfunctie in het algemeen, gebruikt u de rollator dan even niet voordat een professional de remfunctie gecontroleerd heeft.

Waar moet ik op letten als ik iets voor, achter of naast de rollator wil pakken?

Belangrijk is dat u het zwaartepunt niet te veel verplaatst bij het rijden naar hetgeen u wilt pakken; dit kan kantelen van de rollator tot gevolg hebben.

Let altijd op het volgende:

- Plaats de rollator zo dicht mogelijk bij hetgeen u wilt pakken
- Zorg dat de zwenkwielen naar voren gericht staan en vergrendeld zijn
- Zet de rollator op de parkeerrem

Hoe kom ik een trap op en af?

Probeer niet steunend op een rollator een trap op of af te gaan. Klap de rollator op en til deze naar boven of beneden of vraag om begeleiding.

Gebruik de rollator ook niet op een roltrap.

Nog andere tips?

- Als u de rollator langere tijd in de zon laat staan, kunnen de metalen delen heet worden
- Opvallende en/of reflecterende kleding zorgt voor betere zichtbaarheid in het verkeer
- Manoeuvreeer voorzichtig als de tas zwaar beladen is
- Ga nooit op de rollator staan en gebruik deze ook niet als rolstoel
- De rollator is niet geschikt om de gebruiker zittend met de voeten voorwaarts te verplaatsen
- Let op met vuur en brandende sigaretten

4 Uitleg over het gebruik van uw rollator

Hoe vouw ik de rollator uit?

Uw rollator is in 3 stappen gebruiksklaar:

- 1 Leg de rollator met de wielen op de grond en til de handvatten op totdat het scharnier in het frameslot valt
- 2 Bevestig het frameslot
- 3 Haal de handvatten uit elkaar en duw de zitting omlaag totdat deze 'vastklikt'



Hoe vouw ik de rollator op?

Zo makkelijk als hij uit te klappen is, vouwt u hem ook weer – letterlijk – dubbel:

- 1 Til de zitting middels de lus omhoog zodat de twee zijden van de rollator samen komen
- 2 Open het scharnierslot door de hendel uit de sluiting te halen en naar achteren te bewegen
- 3 Nu kunt u de handvatten richting de achterwielen bewegen. Hiermee is de TRACK> dubbel opgevouwen

Mocht u gebruik willen maken van het extra bevestigingskoord, dan kunt u hem eenvoudigweg door de wielen halen en om het frame wikkelen. Vastmaken en klaar! Zo zit hij extra zeker vast voor vervoer in de auto bijvoorbeeld.



Hoe verstel ik de handvatten in lengte?

Aan de buitenzijde van het frame ziet u de 6 standen van de handvatten. Druk de knop in en schuif vervolgens het handvat in of uit totdat het handvat 'vastklikt' in de gewenste stand. Om de juiste hoogte in te stellen, dient u op het volgende te letten:

- Ga tussen de achterwielen staan
- Probeer zo rechtop mogelijk te staan
- De armen moeten met ontspannen schouders langs het lichaam hangen
- De handvatten moeten ter hoogte van de polsen komen
- De ellebogen zijn licht gebogen wanneer u de handvatten vasthoudt

Wat is een goede houding om achter de rollator te lopen?

Voor een goede houding achter de rollator let u op het volgende:

- Probeer zo rechtop mogelijk te lopen
- Blijf tijdens het lopen dichtbij de rollator
- Steun niet teveel op de handvatten
- Zorg er te allen tijde voor dat u de rem kunt bedienen
- Voorkom dat u van vermoeidheid krom gaat lopen

Ga daarnaast op tijd even zitten om uit te rusten. U heeft voldoende evenwicht en kracht in armen en benen nodig om met een rollator te kunnen lopen, naast een stevig paar (veter)schoenen en een goed gezichtsvermogen. Zorg voor een goede bril, indien nodig.

Waar moet ik op letten bij het lopen met de rollator, binnen en buiten?

Let bij het lopen met de rollator binnenshuis op het volgende:

- Zorg voor voldoende ruimte, laat indien nodig meubels verzetten
- Verwijder losliggende kleedjes en drempels
- Zorg voor goede verlichting in alle vertrekken (ook in de hal)

Buiten lopen met de rollator vereist het volgende:

- Pas op voor losliggende stoeptegels
- Til tijdens het lopen goed uw voeten op om struikelen te voorkomen
- Loop eventueel met de vingers door de remhendels: mocht u struikelen, dan kunt u direct remmen
- Maak zoveel mogelijk gebruik van rolstoelopritten bij het op- en afgaan van stoepen
- Rust bij vermoeidheid even uit op de rollator (pas als hij op de parkeerrem staat)

Houdt u er ook rekening mee dat u misschien wat meer tijd nodig hebt met oversteken.

Hoe gebruik ik de parkeerrem?

Door de remhendel naar beneden te bewegen tot dat deze 'vastklikt', zet u de rollator op de parkeerrem. De achterwielen van de rollator zijn nu geblokkeerd. Indien u de remhendel weer omhoog beweegt de-activeert u de parkeerrem.



Hoe moet ik mijn rollator onderhouden?

Wekelijks:

- Controleer of de remmen nog goed werken; let op slijtage en beschadigingen

Elke 3 maanden:

- Controleer of het kruisframe het in- en uitvouwen nog goed mogelijk maakt
- Controleer alle bouten en schroeven; zitten deze nog goed vast?
- Controleer het loopvlak van de banden op slijtage en oneffenheden
- Controleer de bekleding op slijtage
- Controleer de voor- en achterwielen op wielspeling

Alle scharnierende onderdelen zijn eenvoudig soepel te houden door ze regelmatig in te spuiten met een smeermiddel als WD-40.

Hoe maak ik mijn rollator schoon?

Met milde zeep en water kunt u de bekleding, het frame en de kunststof onderdelen reinigen. Het is ook aan te raden het frame met enige regelmaat in de was te zetten.

Gebruik nooit:

- Agressieve schuurmiddelen
- Hoge drukreiniger
- Stoom
- Schurende of oplossende was
- Schadelijke chemicaliën
- Siliconenspray

Maak de rollator altijd goed droog als deze nat geworden is.

5 Garantie

U heeft 24 maanden garantie op zowel het frame als het kruisframe, geldend vanaf de datum van aankoop door de oorspronkelijke koper. Op materiaal- of fabricagefouten heeft u ook 24 maanden garantie.

Garantievoorwaarden

- De garantie is niet overdraagbaar.
- De garantie vervalt bij het aanbrengen van aanpassingen aan de rollator.
- Om gebruik te maken van de garantie neemt u direct contact op met WheelzAhead®. Houd u het serienummer bij de hand.
- Onderdelen ter vervanging worden u geheel gratis toegestuurd.
- Verslijtbare onderdelen vallen niet onder de garantie. Het gaat hier om onderdelen als bekleding, banden, remblokken, binnenbuizen en soortgelijke onderdelen.
- Indien u zelf probeert (of laat proberen) een onderdeel te herstellen, vervalt de garantie.
- De garantie geldt bij normaal gebruik en een goede verzorging van de rollator.
- De garantie geldt alleen bij een aankoop gedaan voor de normale verkoopprijs.

WheelzAhead® BV

Polehof 38
6681 JB Bommel, Netherlands

T +31(0)481 - 45 01 10
E office@WheelzAhead.com
W www.WheelzAhead.com

Bank 1596.16.115
KvK 53888332
VAT NL851059867B01
IBAN NL41 RABO 0159 6161 15
BIC RABONL2U



TRACK 
wheelzahead[®]
LET'S GET MOVING



TRACK 

wheelz_ahead[®]

LET'S GET MOVING